

Karl Bachmann AG

Apparate für Medizin und Forschung



RAPIDO-SEC®



Bedienungsanleitung

Kurzanleitung

Vorbereitung / Anziehen

1. Stecker aus dem Alarmkästchen ziehen.
Ertönt ein kurzer Alarmton, ist die Batterie in Ordnung.
 2. Den Sender mit den Schnappverschlüssen am Sensor befestigen. Das Lämpchen muss aufleuchten (Batteriekontrolle).
 3. Kleben Sie nun den Sender mit Hilfe des Klettbandes auf der Innenseite eines eng anliegenden Slips an und achten Sie darauf, dass der Sensor den Genitalbereich bedeckt.
 4. Falls Ihr Kind kein Tiefschläfer ist, können Sie das Alarmkästchen am Bett festkleben oder auf das Nachttischchen stellen. Selbstverständlich kann das Alarmkästchen auch in einen anderen Raum zur Überwachung mitgenommen werden.
 5. Das Alarmkästchen ist bei Tiefschläfern möglichst nahe beim Kopf mittels Klebeband zu platzieren.
- **Hinweis:** Für **extreme** Tiefschläfer empfehlen wir unser lang-erprobtes Gerät, das auf der Schulter getragen wird (Typ 1).

Wenn der Alarm ertönt

1. Sofort auf die Toilette gehen und die Blase vollständig entleeren.
2. Sender vom Sensor lösen und einen trockenen Sensor einsetzen.


Am Morgen

1. Den Stecker wieder in das Alarmkästchen stecken, da sonst die Batterie unnötig verbraucht wird.
2. Sendekästchen vom Sensor lösen, auch wenn dieser trocken ist.
3. Füllen Sie die Erfolgstabelle aus. Das ist wichtig, damit Sie und Ihr Kind die Fortschritte erkennen.
4. Gebrauchte Sensoren (Kontaktläppchen) gut spülen, aber nicht auswringen und sehr gut trocknen lassen.

Sollten Probleme auftreten oder Sie weitere Fragen haben, so zögern Sie nicht, uns anzurufen oder uns per E-Mail zu kontaktieren.

RAPIDO-SEC® besteht aus:

1 Batterie:
Lithium 3 Volt

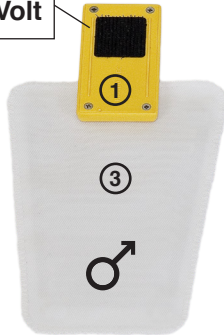

2 Batterien AA:
1,5 Volt Alkaline




① Sender ② Alarmkästchen ③ Sensoren (Kontaktlappchen)

Annähbare Druckknöpfe (beiliegend)

- Anwendung normalerweise nicht nötig
- empfohlen bei unruhigen Schläfern und weiten Boxershorts

So legen Sie **RAPIDO-SEC®** richtig ein:

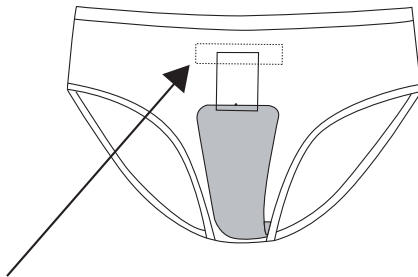

Klettstreifen auf der Innen-
seite des Slips befestigen

Karl Bachmann AG

Apparate für Medizin und Forschung

Lernprozess

Mit **RAPIDO-SEC®** haben Sie sich für eine wirksame Methode zur Bekämpfung des Bettnässens entschieden, die auf einem Lernprozess basiert. Werden die von uns hier empfohlenen Anweisungen und Ratschläge befolgt, wird die Behandlung fast immer zum Erfolg führen.

Motivieren Sie Ihr Kind, aktiv an seiner Behandlung teilzunehmen. Je schneller das Kind lernt, auf das Wecksignal hin aufzuwachen und aufzustehen, desto kürzer ist die Behandlungsdauer.

Allgemeine Vorbereitungen bei der Verwendung von **RAPIDO-SEC®**

Nässt Ihr Kind pro Nacht mehr als einmal, so bereiten Sie einen zweiten Slip mit Kontaktläppchen vor.

Ihr Kind sollte lernen, das Gerät möglichst selbstständig zu bedienen. Erklären Sie ihm die Funktionsweise des Gerätes und füllen Sie zusammen die Erfolgstabelle aus. So erkennen Sie und Ihr Kind den Trainingsfortschritt. Es wird von selbst Motivation für die Therapie aufbringen, wenn es den Erfolg mitverfolgen kann.

Die ersten Nächte

Kontrollieren Sie besonders in den ersten Nächten, dass das Kind sofort nach dem Ertönen des Wecksignals aufsteht. Sollte es nicht sogleich aufwachen, wecken Sie es. Es muss in den ersten Nächten lernen, auf das Signal hin sofort mit Aufwachen und Aufstehen zu reagieren. Loben Sie es jedes Mal, wenn es gut reagiert! Normalerweise wird nach einigen Nächten Training weder das Pyjama noch der Slip nass, da der Patient beim Ertönen des Wecksignals den Urinfluss stoppt. Später erwacht Ihr Kind beim Gefühl der vollen Blase von selbst. Der Apparat ertönt nicht mehr – Ihr Kind ist vom Bettnässen befreit.

Wir empfehlen Ihnen, stets ein weiteres trockenes Kontaktläppchen bereit zu halten, um nach dem Einnässen und dem nachfolgenden Toilettengang sofort die Therapie fortsetzen zu können.

Darf das Kind am Abend normal trinken?

Ja!

Welche Resultate können erwartet werden?

Die Raschheit der Besserung ist von Kind zu Kind verschieden. Normalerweise können Fortschritte schon nach wenigen Nächten festgestellt werden. Als mittlere Therapiedauer kann bei 6-jährigen Patienten etwa 60 Tage angenommen werden, bei 10-jährigen etwa 70 Tage.

Waschen der Kontaktläppchen

Die mit Urin benetzten Kontaktläppchen werden in eine Schüssel mit Waschwasser gelegt; benutzen Sie am besten ein Waschpulver anstelle von fetthaltigen Seifen. Lassen Sie die Kontaktläppchen einige Zeit im Waschwasser, so werden sie schonend gewaschen. Wringen Sie anschliessend die Kontaktläppchen auf keinen Fall aus!

Danach sind sie in warmem Wasser zu spülen und zum Trocknen aufzuhängen. Falls das nicht möglich ist, legen Sie die Kontaktläppchen auf einen Heizkörper oder trocknen Sie diese mit einem Fön. Trocknen Sie die Kontaktläppchen jedoch **nicht im Tumbler!**

Mögliche Störungen

Signal ertönt, wenn sich das Kind stark bewegt oder es auf dem Bauch liegt

Ursache: Die Kontaktläppchen sind nicht vollständig trocken.

Abhilfe: Setzen Sie ein vollständig trockenes Kontaktläppchen ein.

Test: Mit flacher Hand mindestens 10 Sekunden lang stark auf das Kontaktläppchen drücken. Gibt das Alarmkästchen an, dann ist das Kontaktläppchen nicht ganz trocken.

Signal ertönt, nachdem ein frisches Kontaktläppchen eingesetzt wurde

Ursache: Das Kind hat sich nach der Toilette nicht sorgfältig abgetrocknet.

Abhilfe: Setzen Sie ein frisches Kontaktläppchen ein.

Signal ertönt, Kind muss aber nicht auf die Toilette

Ursache: Ihr Kind schwitzt stark oder lässt tropfenweise Urin.

Abhilfe: Legen Sie ein dünnes Tuch zwischen Körper und Kontaktläppchen oder fordern Sie bei uns ein Spezial-Kontaktläppchen an.

Das Kontaktklappchen wurde von Urin benetzt, aber es wurde kein Wecksignal ausgelöst

Ursache: Entweder ist die Batterie des Alarmkästchens oder des Senders entladen (**Wichtig:** Bei Nichtgebrauch immer den Stecker ins Alarmkästchen stecken) oder das Kontaktklappchen ist defekt.

Abhilfe: Setzen Sie entweder in das Alarmkästchen oder in den Sender neue Batterien ein (1,5 Volt Alkaline AA für das Alarmkästchen bzw. Lithium 3 Volt für den Sender) oder benutzen Sie neue Kontaktklappchen.

Das Kind erschrickt beim Ertönen des Wecksignals

Abhilfe: Summer-Öffnung am Alarmkästchen mit Klebeband soweit abdecken, bis eine Lautstärke erreicht wird, die Ihr Kind nicht mehr erschreckt.

Haben Sie noch Fragen? Rufen Sie uns an, wir helfen Ihnen gerne weiter und begleiten Sie bei der Therapie des Bettnässens.

**Nun wünschen wir Ihrem Kind
raschen Erfolg mit
RAPIDO-SEC®!**

Karl Bachmann AG

Apparate für Medizin und Forschung

Karl Bachmann AG

Apparate für Medizin und Forschung

Zürcherstrasse 114

Tel. 055 440 44 33

Postfach

Fax 055 440 87 91

CH-8855 Wangen

service@karlbachmannag.ch

